

STETOSCOPIO PIATTO

SCHEDA TECNICA

Definizione

- Stetoscopio piatto.

Caratteristiche generali

- Padiglione piatto.
- Archetto in metallo.
- Olive applicate all'archetto.
- Tubo a Y.
- Peso 240 gr.

Indicazioni d'uso

- Rilevazione del battito cardiaco necessaria alla misurazione/automisurazione della pressione arteriosa.



Dispositivo medico: direttiva 93/42 CEE

Classe I

Conformità

- 93/42/CEE Medical device Directive



Specifiche tecniche

Sterile	No
Stoccaggio	Conservare in luogo fresco e asciutto lontano da fonti di luce e di calore
Umidità di conservazione [%]	15 ~ 75% RH max
Garanzia	2 anni

Pulizia e mantenimento

- Pulire con cura utilizzando un panno morbido pulito imbevuto di alcol.
- Non effettuare pressioni sulla membrana.
- Non utilizzare altri prodotti chimici.
- Non immergere in liquidi per la pulizia.
- Non eseguire sterilizzazioni a caldo.

Smaltimento

- In accordo con la normativa vigente.

Avvertenze d'uso

- Controllare sempre che le olive siano applicate sull'archetto prima di utilizzare lo stetoscopio.
- Non esporre l'apparecchio a fonti di calore o a temperature troppo basse.
- Evitare danneggiamenti del tubo o della membrana tramite oggetti taglienti e aguzzi.