



CPS202

Descrizione completa

Prima stazione di lavaggio oculare in Italia e nel mondo con un design innovativo per una maggiore efficacia. Costituita da 2 flaconi di soluzione salina sterile monouso da ml 500 con tappo oculare montato per un utilizzo rapido. Supporto termoformato con parte frontale trasparente con chiusura antipolvere per una protezione ottimale della soluzione salina. Dotato di specchietto per un facile controllo dell'occhio durante il lavaggio.

Fornito con viti e tasselli per l'applicazione a parete per un'installazione semplice e sicura.

Numero di repertorio 132443.

Modalità di utilizzo:

- Per aprire DROP è sufficiente tirare leggermente il coperchio lasciandolo cadere verso il basso. Estrarre il flacone e ruotare il tappo. In questo modo si rompe il sigillo ed il flacone è pronto all'uso. Il tappo anatomico consente di dirigere in modo preciso il getto ottenendo un efficace lavaggio oculare senza sprechi. A fine intervento, lo specchietto montato nella stazione può essere un utile accessorio per fare una prima valutazione dei danni.

Dimensioni: 320x410x80 mm.

